

# Brava<sup>®</sup> Hudskyddsplatta

## Ett extra lager av hudskydd

Brava Hudskyddsplatta används under basplattan när behov finns för extra absorption av fukt eller när huden behöver skydd för frekventa byten av stomibandaget.


- **Skyddar huden** – absorberar fukt och skyddar huden från avföring eller urin för att hålla huden frisk
- **Förhindrar att basplattan släpper** – skapar en slät yta för stomibandaget att fästa på
- **Lätt att avlägsna** och lämnar inga rester på huden
- **Enkel att klippa** för att skräddarsy plattan till olika kroppsprofiler och stomiformer
- **Tillgänglig** i två storlekar




### Brava<sup>®</sup> Hudskyddsplatta

Storlek	Styck/fp	Artikelnr	Apoteksvarunr
10 x 10 cm	10	032105	261552
15 x 15 cm	5	032155	261560


# Så här använder du Brava Hudskyddsplatta

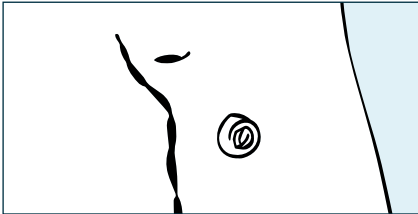

1. Se till att huden runt stomin är ren och torr.

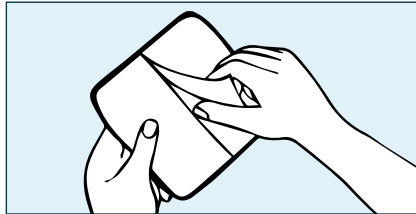


2. Ta ut hudskyddsplattan från förpackningen och ta bort båda skyddspapper från den icke-häftande sidan. Vik plattan vid delningslinjen för att ta bort skyddspappret.

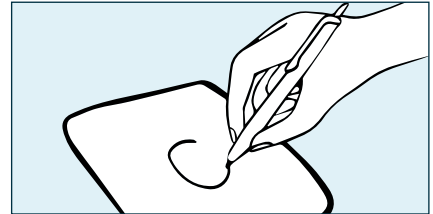


3. Märk ut önskad hålstorlek med en penna.


**Tips** – Använd en "mall" från ditt stomibandage för att få rätt mått på hålet.

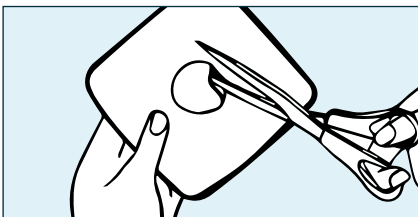

4. Klipp upp ett hål efter markeringen.

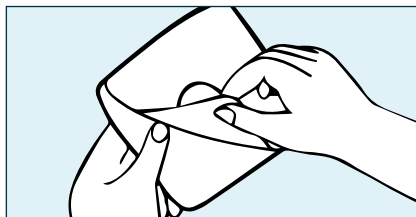

5. Avlägsna skyddspappret från den häftande sidan.

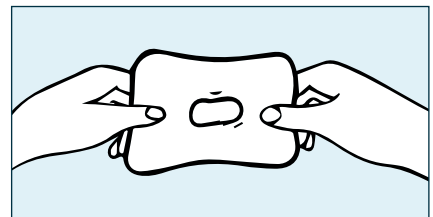

6. Sätt den vidhäftande sidan av plattan mot huden och tryck fast den ordentligt med fingrarna.

Plattans elasticitet gör att hålet kan utvidgas när den sätts på plats. Plattan dras sedan ihop så att den sluter tätt runt stomin.

Applicera stomibandaget.

## Borttagning av stomibandage



Dra försiktigt i fliken på basplattans ovansida. Använd en fuktig kompress eller häftborttagning för en mer skonsam borttagning av basplattan.

Rulla försiktigt basplattan nedåt samtidigt som du trycker lätt mot huden med den andra handen.

Hudskyddsplattan lossnar vanligtvis tillsammans med basplattan. Det är inte skadligt om små mängder häftrester lämnas kvar på huden. Det försämrar inte heller vidhäftningen av nästa stomibandage.