

Brava® Skyddande tätningsring

Har bevisats minska läckage avsevärt jämfört med andra ringar på marknaden¹

Brava Skyddande tätningsring används för en bättre passform mellan stomin och basplattan och skyddar huden mot läckage.

- **Skyddar huden** – absorberar fukt och skyddar huden från avföring eller urin för att hålla huden frisk
- **Motståndskraftig mot erosion** – Perfekt för stomier med aggressiva flöden
- **Hudvänlig** – innehåller inga konserveringsmedel och parabener
- **Förhindrar att stomibandaget släpper** – skapar en slät yta för stomibandaget att fästa på
- **Lätt att forma och applicera** så den sluter tätt kring stomin. Fyller även ut ärr och veck
- **Mjuk och följsam** – följer kroppens konturer och rörelser
- **Lätt att avlägsna** och lämnar inga rester på huden
- **Tillgänglig** i olika storlekar och tjocklekar



Brava® Skyddande tätningsring

Hålstorlek	Ringstorlek	Tjocklek	Antal/fp	Artikelnr
18 mm	48 mm	2,5 mm	30	120350
18 mm	48 mm	4,2 mm	30	120450
27 mm	57 mm	2,5 mm	30	120370
34 mm	64 mm	2,5 mm	30	120390

Så här använder du Brava Skyddande tättningsring



1. Se till att huden runt stomin är ren och torr.



2. Ta ut ringen från förpackningen och ta bort båda skyddspappren genom att dra i flikarna.



3. Forma och töj ringen till önskad form.



4. Tryck ringen försiktigt på plats. Justera formen igen vid behov.



5. Applicera stomibandaget.

Det finns flera sätt att applicera ringen t.ex:



1. Ringen kan appliceras direkt på basplattan innan stomibandaget appliceras på huden.



2. Riv eller klipp isär ringen och applicera omlott invid stomin. Börja alltid klockan tolv.

Borttagning av stomibandage



Dra försiktigt i fliken på basplattans ovansida. Använd en fuktig kompress eller häftborttagning för en mer skonsam borttagning av basplattan.

Rulla försiktigt basplattan nedåt samtidigt som du trycker lätt mot huden med den andra handen.

Ringens lossnar vanligtvis tillsammans med basplattan. Det är inte skadligt om små mängder häftrester lämnas kvar på huden. Det försämrar inte heller vidhäftningen av nästa stomibandage.

1. Tested in a pre-clinical setting, Coloplast Data-on-File, 2019

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2025-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark. SP11043