

Brava® Barriärkräm

Skonsamt skydd för torr, öm och irriterad hud

Brava Barriärkräm används för att skydda huden från avföring eller urin och har en återfuktande effekt.

- **Effektivt återfuktande** – Krämen har en återfuktande effekt som hjälper till att motverka torr, öm och irriterad hud och förebygger peristomala hudproblem. Krämen ger även behaglig lindring vid torrhet och klåda
- **Långverkande barriär** – Krämen skapar en barriär som skyddar huden mot avföring, urin eller basplattors häfta
- **Fri från parabener, parfym och alkohol** och lämpar sig väl för känslig hud i alla åldrar
- **Påverkar inte vidhäftningsförmåga** för basplattor eller tejp



Brava® Barriärkräm

Volym	Styck/fp	Artikelnr	Apoteksvarunr
60 ml	1	120005	738604

Så här använder du Brava Barriärkräm



1. Se till att huden runt stomin är ren och torr.



2. Tryck ut lite Brava Barriärkräm på fingret, en kompress eller direkt på huden. Ta inte mer kräm än det motsvarar ett "knappnålshuvud".



3. Smörj varsamt in ett tunt lager av krämen på området där du har torr, öm eller irriterad hud.



4. Torka bort överflödig kräm med en kompress och låt huden torka innan du applicerar nästa stomibandage.

Tips

Behöver du ta bort hårväxt runt stomin, kan du försiktigt raka bort det med hjälp av en engångsrakhyvel, lite Brava Barriärkräm och vatten.