

Brava® Formbar pasta

Användarvänlig pasta för ärr och veck

Brava Formbar pasta används för att fylla ut veck och håligheter och skapar en jämn yta för stomibandaget att fästa på för att minska risken för läckage.


- **Skyddar huden** – absorberar fukt och skyddar huden från avföring eller urin för att hålla huden frisk
- **Förhindrar att basplattan släpper** – skapar en slät yta för stomibandaget att fästa på
- **Lätt att applicera och forma** – fyller ut och jämnar till djupare veck, rynkor och ärr
- **Lätt att avlägsna** och lämnar inga rester på huden
- **Hållbar** – motståndskraftig mot uppluckring
- **Hudvänlig** – Innehåller ingen alkohol som kan ge sveda eller torka ut huden




Brava® Formbar pasta

Styck/fp	Artikelnr	Apoteksvarunr
10	026555	275792


Så här använder du Brava Formbar pasta

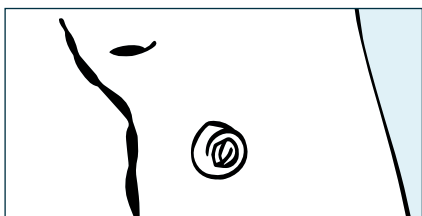

1. Se till att huden runt stomin är ren och torr.

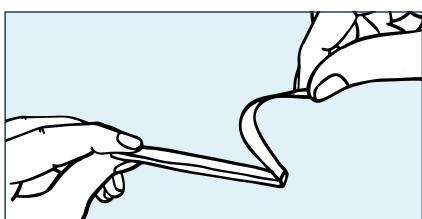


2. Ta ut Brava Formbar pasta från förpackningen och ta bort båda skyddspappren.

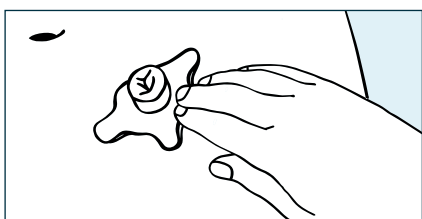

3. Placera en bit pasta på den ojämna huden och forma den efter huden. Pastan måste fylla hela håligheten så att pastan och huden är i jämnhöjd med varandra. För att underlätta appliceringen kan du fukta fingret med vatten innan du formar pastan.

Alternativt kan pastan appliceras direkt på basplattan innan stomibandaget appliceras på huden.

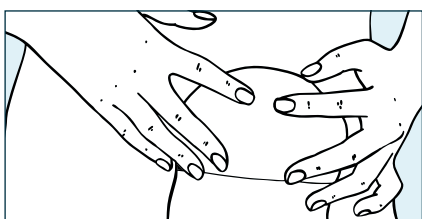

4. Applicera stomibandaget.

Borttagning av stomibandage



Dra försiktigt i fliken på basplattans ovansida. Använd en fuktig kompress eller häftborttagning för en mer skonsam borttagning av basplattan.

Rulla försiktigt basplattan nedåt samtidigt som du trycker lätt mot huden med den andra handen.

Den formbara pastan lossnar vanligtvis tillsammans med basplattan. Det är inte skadligt om små mängder häftrester lämnas kvar på huden. Det försämrar inte heller vidhäftningen av nästa stomibandage.