

Brava[®] Hudbarriär

Skapar en tunn film som skyddar huden

Brava Hudbarriär används för att skydda huden från avföring, urin och medicinska häftor och minskar risken för hudproblem.

- **Skyddar mot läckage och häfta**
 - Skapar en tunn skyddande film som andas
- **Förhindrar uppbyggnad av rester**
 - Eventuella rester av barriären följer med när stomibandaget tas bort eller genom rengöring
- **Hudvänlig** – Silikonbaserad lösning som är hudvänlig
- **Svider inte** – Innehåller ingen alkohol som kan ge sveda eller torka ut huden
- **Torkar på ett par sekunder**
 - Nästa stomibandage kan appliceras nästan direkt vilket underlättar snabba byten
- **Tillgänglig** som spray och som praktisk våtservett



Brava[®] Hudbarriär spray och våtservett

	Styck/fp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Spray	1	120205	732903
Våtservett	1	120215	732902

Så här använder du Brava Hudbarriär våtservett



1. Se till att huden runt stomin är ren och torr.



2. Ta ut våtservetten från förpackningen och veckla ut den.



3. Applicera ett skyddande lager på huden runt stomin.



4. Vänta tills huden har torkat innan du applicerar nästa stomibandage.

Så här använder du Brava Hudbarriär spray



1. Se till att huden runt stomin är ren och torr.



2. Håll flaskan 10 cm från huden. Spraya ett skyddande lager på huden runt stomin.



3. Vänta tills huden har torkat innan du applicerar nästa stomibandage.