


Brava[®] Multismörjande deodorant

Neutraliserar lukt och smörjer påsens insida

Brava Multismörjande deodorant neutraliserar lukten vid byte eller tömning av stomibandaget. Den smörjande effekten underlättar när påsen ska tömmas.

- **Neutraliserar lukt** vid byte eller tömning av stomibandaget
- **Smörjande effekt** – smörjer påsens insida vilket gör att avföringen lättare glider nedåt i påsen och underlättar tömningen. Deodoranten förebygger även "pancaking"
- **Hudvänlig** – Deodoranten ska appliceras inuti påsen, men kommer vätskan i kontakt med huden är det inga problem
- **Tillgänglig** som flaska och praktisk dosförpackning

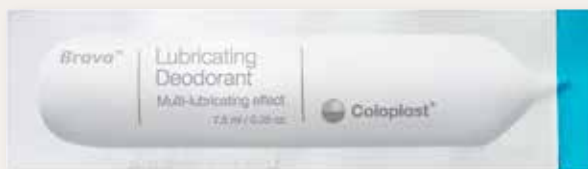

Brava[®] Multismörjande deodorant

	Volym	Styck/fp	Artikelnr	Apoteksvarunnr
Flaska	240 ml	1	120610	733261
Dosförpackning	7,5 ml	20	120600	733280

Så här använder du Brava Multismörjande deodorant

Tömbar påse



1. Skaka flaskan innan användning.



2. Tillsätt 5-10 ml eller 1 dosförpackning av Brava Multismörjande deodorant i påsen genom utloppet.



3. Gnid påsens sidor mot varandra för att deodoranten ska fördelas jämnt på insidan.



4. Upprepa efter varje tömning.

Sluten påse



1. Skaka flaskan innan användning.



2. Tillsätt 5-10 ml eller 1 dosförpackning av Brava Multismörjande deodorant i påsen genom hålet i basplattan.



3. Gnid påsens sidor mot varandra för att deodoranten ska fördelas jämnt på insidan.