

# Brava<sup>®</sup> Skyddande tätningsring convex

## Formbar ring med mjuk konvexitet

Brava Skyddande tätningsring convex används för att skydda huden mot läckage vid indragna stomier eller stomier i hudplan samt vid veck eller ärrbildning runt stomin.

- **Formbar** för att passa alla stomiformer; ovala, runda eller loopileostomier
- **Bibehåller sin konvexitet** efter formning
- **Absorberar fukt** och bibehåller en frisk hud
- **Hög vidhäftningsförmåga** och fyller även de minsta vecken
- **Lämnar minimala rester** på huden och är erosionsbeständig
- **Ger en skraddarsydd konvex lösning** i kombination med släta basplattor eller SenSura Mio Convex Flip basplattor
- **Tillgänglig** i sex storlekar



### Brava<sup>®</sup> Skyddande tätningsring convex

Hålstorlek	Ringstorlek	Tjocklek	Styck/fp	Artikelnr	Apoteksvarunr
20 mm	60 mm	8 mm	30	120900	730578
25 mm	65 mm	8 mm	30	120910	730579
30 mm	70 mm	8 mm	30	120920	730581
35 mm	75 mm	8 mm	30	120930	730582
40 mm	80 mm	8 mm	30	120940	730583
45 mm	85 mm	8 mm	30	120950	730584

# Så här använder du Brava Skyddande tättningsring convex



1. Se till att huden runt stomin är ren och torr.



2. Ta ut ringen från förpackningen och ta bort båda skyddspappren genom att dra i flikarna.



3. Forma och töj ringen till önskad form.



4. Tryck ringen försiktigt på plats. Tänk på att den konvexa sidan ska fästas mot magen och den platta sidan mot stomibandaget. (Den konvexa sidan har en prickig skyddplast). Justera formen igen vid behov.



5. Applicera stomibandaget.

## Det finns flera sätt att applicera ringen t.ex:



Ringen kan appliceras direkt på basplattan innan stomibandaget appliceras på huden.



Klipp isär ringen och applicera omlott invid stomin. Börja alltid klockan tolv.

## Borttagning av stomibandage



Dra försiktigt i fliken på basplattans ovansida. Använd en fuktig kompress eller häftborttagning för en mer skonsam borttagning av basplattan.

Rulla försiktigt basplattan nedåt samtidigt som du trycker lätt mot huden med den andra handen.

Tättningsringen lossnar vanligtvis tillsammans med basplattan. Det är inte skadligt om små mängder häftrester lämnas kvar på huden. Det försämrar inte heller vidhäftningen av nästa stomibandage.