

# Brava® Tubpasta

## Snäll mot huden, tuff mot läckage

Brava Tubpasta används för att fylla ut rynkor och veck och skapar en jämn yta för stomibandaget att fästa på för att minska risken för läckage.

- **Skyddar huden** – absorberar fukt och skyddar huden från avföring eller urin för att hålla huden frisk
- **Förhindrar att basplattan släpper** – skapar en slät yta för stomibandaget att fästa på
- **Lätt att applicera och forma** – fyller ut och jämnar till veck, rynkor och ärr
- **Svider inte** – Innehåller ingen alkohol som kan ge sveda eller torka ut huden
- **Hållbar** – motståndskraftig mot uppluckring



### Brava® Tubpasta

Vikt	Styck/fp	Artikelnr	Apoteksvarunr
60 g	1	120500	733240

# Så här använder du Brava Tubpasta



1. Se till att huden runt stomin är ren och torr.



2. Brava Tubpasta kan appliceras på huden direkt ur tuben. Tryck ut pasta på den ojämna huden och forma den efter huden. Pastan måste fylla hela håligheten så att pastan och huden är i jämnhöjd med varandra. För att underlätta appliceringen kan du fukta fingret med vatten innan du jämnar till pastan. Torka bort överflödiga pasta från tuben med hjälp av lite papper.



3. Applicera stomibandaget.



**Det finns flera sätt att applicera pastan t.ex:**

Pastan kan appliceras direkt på basplattan innan stomibandaget appliceras på huden.

## Borttagning av stomibandage



Dra försiktigt i fliken på basplattans ovansida. Använd en fuktig kompress eller häftborttagning för en mer skonsam borttagning av basplattan.

Rulla försiktigt basplattan nedåt samtidigt som du trycker lätt mot huden med den andra handen.

Pastan kan tvättas bort med ljummet vatten och en kompress. Fettrester från pastan kan finnas kvar på huden vid nästa applicering. Det är bättre att låta lite rester sitta kvar, än att riskera att irritera huden genom att ta bort allt.