



Så här använder du SenSura Mio 2-dels Click Convex Flip

Denna instruktion gäller både för sluten, tömbar och urostomipåse.

1.



Du behöver:

- Basplatta
- Stomipåse
- Kompresser för rengöring
- Böjd sax
- Avfallspåse
- Eventuella tillbehörsprodukter

2.



Klipp hålet i basplattan

Rita av stomins form och storlek på klippguiden. Klipp sedan till rätt storlek med hjälp av en liten böjd sax. Det är viktigt att basplattans hål passar perfekt runt stomin och inte klämmer åt. All hud runt stomin ska vara täckt.

Mät din stomi med jämna mellanrum då den kan ändra storlek och form, särskilt under den första tiden efter operation. Anpassa hålet i basplattan.

3.



Ta bort ditt stomibandage

Dra försiktigt i fliken på basplattans ovansida. Använd en fuktig kompress eller häftborttagning för en mer skonsam borttagning av basplattan.

Rulla basplattan försiktigt nedåt samtidigt som du trycker lätt mot huden med den andra handen.

Ett tips är att fästa en avfallspåse i byxlinningen för enklare hantering. Förslut avfallspåsen innan du kastar stomibandaget i det vanliga hushållsavfallet.



Rengör stomin och huden

Använd en fuktig kompress med ljummet vatten. Torka torrt. Huden måste vara helt torr innan du applicerar stomibandaget.

Det är inte skadligt om små mängder av häftrester lämnas kvar på huden. Det försämrar inte heller vidhäftningen av nästa stomibandage.



Applicera tillbehörsprodukter vid behov


Använder du tillbehörsprodukter såsom barriärkräm eller hudbarriärskydd appliceras dessa innan stomibandaget appliceras. Använder du tättningsring kan den appliceras direkt på huden eller på basplattan.



Förbered ditt stomibandage

Böj upp alla fem flikarna på basplattan för att förbereda applicering.

Avlägsna skyddsplasten från basplattan genom att dra i den turkosa fliken.

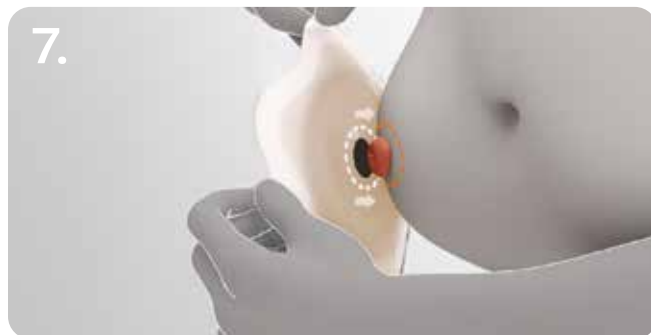

Applicera din basplatta

Håll basplattan med flikarna tillbakaböjda. Rikta in mittdelen av basplattan runt stomin. Tryck försiktigt mittdelen mot huden. Vik sedan ner flikarna över området runt stomin.



Massera fast basplattan

Massera fast basplattan mot huden i 30-60 sekunder. Börja vid stomin och fortsätt utåt mot kanten av basplattan tills det är full kontakt mellan huden och basplattan. Se till att ytan mellan flikarna har god kontakt med huden och att flikarna sitter ordentligt fast.



Placera påsen på basplattan

Se till att låsringen är öppen och rikta in påsens koppling mot basplattans koppling.



10.

Applicera din påse

Tryck lätt med fingrarna på påsen tills du hör ett "klick" så att du vet att påsen är rätt placerad på basplattan.



11.

Stäng låsringen

Tryck på låset tills du hör ett "klick" så att du vet att påsen är ordentligt fastsatt.



12.

Byt påsen vid behov

Tryck på den prickade fliken för att öppna låsringen. Den använda påsen avlägsnas genom att ta tag i den lilla fliken på påsen och dra påsen från basplattan. Tvätta rent basplattan och applicera därefter en ny påse.

Stomibandaget läggs i en liten avfallspåse innan det slängs i det vanliga hushållsavfallet.

Skanna QR-koden och se våra instruktionsfilmer



Sluten påse



Tömbar påse

